



Artikelnummer 1000021294

ABENA®

Tejpskydd, ABENA Slip, XL4, orange färgkod, Premium

- ✓ Högeffektiv kärna med Top-Dry-teknik
- ✓ 360° läckagebarriärer som förhindrar läckage runt hela produkten
- ✓ Svängda benresårer för optimal passform
- ✓ Våtindikator med rutsystem för läckagemätning
- ✓ Stöd för frisk hudbalans



Produktbeskrivning

ABENA Slip är vårt förstklassiga sortiment av helt andningsbara och anatomiskt formade allt-i-ett-skydd med tejp mot läckage i samband med måttlig till kraftig inkontinens. Den högeffektiva kärnan med Top-Dry-teknik skapar snabb absorption och en torr yta även efter flera läckage. En kombination av olika barriärer (synliga och osynliga) och resårer (böjda benresårer) ger 360-graders läckageskydd runt hela produkten. Tillsammans hjälper dessa funktioner till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden. Odörsystemet minskar risken för oönskad lukt. Den elastiska kombitejpen håller hög kvalitet med dubbel tejpfunktion och gör det enkelt att justera skyddet tills det sitter säkert och bekvämt. Med hjälp av våtindikatorn och rutsystemet kan användare och vårdgivare hitta den produkt som har rätt absorptionsnivå, vilket också underlättar vid byten. Produkterna är dermatologiskt testade och bär det nordiska Svanenmärket.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Tejpskydd
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Slip
Storlek	XL4
Färg	Vit
Egenskaper	Orange färgkod
Material	Andningsbart bakfolie (BTBS), ECF fluff, elastan, elastisk kombitejp, nonwoven, PE, PP, resin, SAP
Längd/djup	970 mm
Bredd	850 mm
Höftmått	110-170 cm
Tolerans	+/- 10%
Absorption (Rothwell)	4085 ml
Praktisk absorption	1362 ml
Kön	Unisex
Kvalitetsnivå	Premium
Märkningar	CE, MD, Svanenmärket, UKCA
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Förvaras utom räckhåll för barn.

På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum: 5 år

Förvaringsinstruktioner Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Allt-i-ett-skydd med tejp för urinläckage vid måttlig till kraftig inkontinens, designade för extra krävande situationer och för sängliggande patienter. Det är enkelt att hitta rätt storlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem. Det är viktigt att utgå från höftmättet för att hitta rätt storlek och att välja rätt absorptionsnivå för att undvika läckage. Vik skyddet på längden med spärrskiktet utåt, så att det formas till en skål. Dra på skyddet framifrån. Vik ut framkanten av skyddet, och skapa som en kanal mellan benen. Fäst de nedre tejpbitarna vinkelade något uppåt på båda sidor och fäst sedan de övre tejpbitarna vinkelade nedåt för säker och bekväm passform. Det går att ta på produkterna i både upprätt position (användaren själv eller med hjälp) och liggande position. Se fixeringsguiden i vår broschyr för detaljerad information.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	48 st	61.6 cm	39.6 cm	37.7 cm	5713571000311
fp	12 st	38 cm	18 cm	28 cm	5713571000304
st	1 st				



Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



Läckagespärar i bensnittet och runt den absorberande kärnan hjälper med att förhindra läckage och ger en optimal passform.



Produkten andas fullt ut för användarens komfort; även vid långvarig användning. Hjälper att bibehålla hudens integritet.



Produkten har flexibla tejper för att säkerställa den bästa möjliga kombinationen av komfort, passform och läckageskydd. Den blå dubbeltejpen garanterar en extra möjlighet till ompositionering.



Din garanti att våra produkter blivit testade mot ingredienser vilka potentiellt kan orsaka hudirritation. Tester genomförda av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Den unika strukturen i vår högpresterande kärna är designad för snabb spridning och inkapsling av urin, vilket resulterar i en torr yta även efter flera tomrum.



Luktkontroll är en kritisk faktor för att säkerställa diskret användning. ABENAs inkontinensprodukter är designade och konstruerade för att säkerställa att minimal lukt uppstår från produkten.



Unik Top-Dry Teknologi som ger snabb absorption och säkerställer en torr yta även efter flera tomrum.



Våtindikatorn är en fuktkänslig remsa som ändrar färg eller bleknar bort för att indikera när det är dags att byta produkt.



En kombination av 100 % andningsförmåga, Top-Dry och läckageskydd ger en torr yta och frisk hud även efter flera tomrum vilket hjälper till att bibehålla hudens naturliga pH-balans.



Produkten innehåller inte latex.



Droppsystem som visar absorptionsförmåga. Ju fler droppar, desto bättre absorption. Skala från 1 till 9 droppar.

