



PRODUKTFAKTABLAD

CURI MED Stödbinda, Ideal 10

2015-04-13

Art nr: 221100 + 221096 - 221099

Beskrivning

Stödbinda

Latexfri

Off white

Osteril

90 % elasticitet

Till flergångsbruk, kan tvättas i tvättpåse i 90°C. Ska torkas liggande

Kan steriliseras genom Autoklavering i 134°C, Etylenoxid eller Gammastrålning



Material

Bomull 100 %

CE

CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, Klass 1

Certifikat

Är framställt i förhållande till Oeko-Tex Standard 100

Användning

Elastiskt stödbandage av hög kvalitet. Används som stödbandage vid trauma på leder och muskler där man önskar en kraftig kompression och som efterbehandling till frakturer och luxationer. Kan även användas till fixering av sårbandage och gipsskenor. Det höga innehållet av bomull gör bindan mycket mjuk och tillåter huden att andas. Bindan suger ej åt sig av krämer och liknande, utmärkt om huden är torr och behöver smörjas.

Förpackning

Levereras styckpackade i cellofan för att behålla renheten även efter att kartongen är öppnad. Passar även utmärkt i verksamheter som ambulans och hemsjukvård där de enkelt kan packas om till annan förvaring. Det medföljer ett clips till varje bandage för att hålla ihop bindan när den ej används.

Art nr	Benämning	Storlek	Antal/förp	Antal förp/kart
221100	Stödbinda, ideal 10	4 cm x 10 m	6	8
221096	Stödbinda, ideal 10	6 cm x 10 m	6	8
221097	Stödbinda, ideal 10	8 cm x 10 m	6	8
221098	Stödbinda, ideal 10	10 cm x 10 m	6	4
221099	Stödbinda, ideal 10	12 cm x 10 m	6	4

**Förvaring**

Förvaras torrt och skyddat från solljus.

Förvaras i -5 till +25°C

Hållbarhet: 5 år efter produktionsdagen vid rätt förvaring

Destruktion av vara: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

Destruktion av emballage: Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas