



Diversey

Oxivir Plus

Rengöring och desinfektion för icke invasiva medicinska instrument och oporösa ytor

Produktbeskrivning

Diversey Oxivir Plus Conc, baserad på patenterad Accelerated Hydrogen Peroxide (AHP) teknologi, är ett bredspektrumverkande rengörings- och desinfektionsmedel för icke-porösa hårda ytor. Den aktiva ingrediensen, väteperoxid, bryts ned till vatten och syre bara några minuter efter användning och lämnar inga rester som kan vara skadliga eller förändra ytans utseende. Oxivir Plus är ett idealt rengörings- och desinfektionsmedel för användning inom en mängd olika sektorer, inklusive utbildning, hotell, semesterparker, fritid, livsmedelsservice och detaljhandel.

Produktegenskaper

- Högkoncentrerat rengörings- och desinfektionsmedel i en och samma produkt
- Effektiv mot bakterier (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli* & *E. hirae* på 30 sekunder under rena förhållanden)
- Effektiv mot höljbärandevirus (*vaccinia-virus* och *coronavirus* på 30 sekunder under smutsiga förhållanden)
- Patenterad innovativ teknik med accelererad väteperoxid (AHP)
- Inga riskvarningar, klassificeringar eller uttalanden vid användning
- Säker att använda i områden för matberedning, kontakt- och serviceområden
- Kräver ingen sköljning (*undantag för ytor som kommer i kontakt med livsmedel)
- Fri från dofter och skadliga toxiner
- Certifierad enligt Woolsafe

Produktfördelar

- Rengörings- och desinfektionsmedel i en och samma produkt, vilket ökar effektiviteten och minskar kostnader och arbete
- Omfattande testad enligt europeiska normer (EN) och effektiv mot flera patogener, inklusive bakterier och virus vid korta kontakttider. (*Salmonella*, *E-coli*, *P. aeruginosa*, *MRSA*, *Coronavirus*, *Vaccinia Virus*, *Norovirus*, *Influenta*, *HIV*)
- Oxivir Plusprodukterna är säkra att använda, utan riskvarningar, klassificeringar eller förklaringar vid användning, och innehåller inga luftvägsirriterande ämnen för att säkerställa optimal luftkvalitet.
- Oxivir Plus har en utmärkt hållbarhetsprofil och innehåller inga miljöklassificeringar
- Oxivir Plus är Woolsafecertifierad och kan användas säkert på de flesta tyger (kontrollera alltid ett litet område först)
- Säker att använda vid matberedning och i kontaktområden


Bruksanvisning

Sprayning av allmänna områden:

1. Avlägsna grov smuts
2. Applicera på ytor genom att antingen spraya på torkduken och torka av ytorna eller applicera direkt på ytan med hjälp av en triggerspruta
3. Efter kontakttiden, torka torrt eller låt lufttorka

Rengöring med hink; allmänna områden:

1. Avlägsna grov smuts. Applicera på ytan med en mopp eller duk
2. Efter kontakttiden, torka torrt eller låt lufttorka

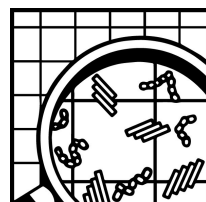

© A.I.S.E



Oxivir Plus

Användningsinstruktioner; livsmedelsberedning och kontaktytor (I enlighet med FSA Guidance):

1. Späd till 1,5% (7,5 ml i 500 ml vatten om du använder en sprayflaska eller 45 ml vatten i en 3L hink)
2. Avlägsna grov smuts
3. Applicera Oxivir Plus och torka över ytor
4. Applicera Oxivir Plus på nytt och låt verka i minst 30 sekunder
5. Torka av ytan
6. Skölj och lufttorka

Rengöring och desinfektion med blötläggning; livsmedelsberedning och kontaktytor:

1. Använd en koncentration på 1,5 %.
2. Avlägsna grovt skräp
3. Placera föremålen i lösningen
4. Tillåt 5 minuters kontakttid
5. Torka rent, skölj och låt torka

Dosering*

Se EN-tabellen för rekommenderad dosering och kontakttid.

Exempel: Vid 1,5% utspädning ger varje förpackning med 2x5L: 1,333 x 500ml triggerflaskor/222 x 3L hinkar.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*

Teknisk information

Utseende:	Klar ljusgul vätska
pH koncentrat:	< 2
pH brukslösning:	~ 2
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ lokala föreskrifter och råd.

Att beakta

Viktigt att tänka på: Får inte blandas med andra produkter. Använd inte varmt vatten. Använd inte på vatten- eller syrakänsliga ytor. Under rekommenderade användningsförhållanden är Diversey Oxivir Plus lämplig för användning på de flesta vanligt förekommande material.



Oxivir Plus

Mikrobiologisk information

EN Test	Organisms	Conditions	1.5%	2%	3%	4%
EN 1276: 2019 FIDI	E.coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae	Clean	30 Sec			
EN 1276: 2010 FIDI	E.coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae	Dirty		5 Min	1 Min	30 Sec
EN 13697: 2015 FIDI	E.coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae	Dirty				5 Min
EN 14476: 2016 & 2019 MED	Vaccinia virus	Dirty	5 Min		30 Sec	
EN 14476: 2016 & 2019 MED	Adenovirus & Poliovirus	Dirty				5 Min
EN 14476: 2016 MED	Murine Norovirus	Clean				2 Min
EN 14476: 2013 MED	Fully Virucidal	Clean				5 Min
EN 16777: 2019 MED	Vaccinia virus	Dirty			30 Sec	

Miljöinformation

De yttaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med kraven i EU:s förordning om tvätt- och rengöringsmedel, EG 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100827422	DI Oxivir Plus 2x5L W4340	Standard

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 12/02/2024 sv-SE (K00232)