



Liv Des 70

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel för rengjorda ytor. Avsedd att användas för desinfektion av rena släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol.

Endast för professionell användning, av hälsovårdspersonal (medicinskt ändamål) och professionella lokalvårdare (icke-medicinskt ändamål).

Aktiv substans: etanol 617 g/kg, isopropanol 62 g/kg.
Innehåller ca 75 vol% etanol.

Bruksanvisning

För icke-invasiva medicintekniska produkter, följ alltid tillverkarens bruksanvisning.

Appliceras på torr och rengjord yta. Applicera rikligt med desinfektionsmedel direkt på ytan. Bearbeta ytan med ren torkduk/luddfritt papper. Låt ytan vara fuktig hela verkningstiden, därefter lufttorka.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17320001	Liv Des 70 1 L	12 * 1L	7391443173233
1732M001	Liv Des 70 1 L Membrankapsyl	12 * 1L	7391443173288

UNSPSC: 42281604





CE-märkt medicinteknisk produkt, Klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt

Verkningstid:

Bactericidal EN13727:	1 min
Bactericidal EN13727 Listeria:	30 sek
Bactericidal EN13697:	2 min
Bactericidal EN16615:	5 min
Yeasticidal EN13624:	30 sek
Yeasticidal EN13697:	2 min
Yeasticidal EN16615:	5 min
Fungicidal EN13624:	5 min
Virucidal EN14476	
Höljeförsedda virus:	2 min
Adeno virus:	2 min
Mourine Noro:	30 sek

Användarsäkerhet

Använd Liv Des 70 på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

För ytterligare teknisk specifikation, se säkerhetsdatablad.

- Allvarliga incidenter med Liv Des 70 ska anmälas till info@clemondo.se samt till Läkemedelsverket.
- Produkten ska inte användas på ytor eller utrustning som är känsliga för produkten, t.ex. material som kan korroderas eller skadas av alkohol.
- Personer med allergier eller känslighet mot vissa kemikalier i desinfektionsmedel kan få hudutslag, andningsproblem eller andra allergiska reaktioner. Använd skyddsutrustning vid behov.
- Kan vara mindre effektiv i närvaro av organiskt material som smuts och kroppsvätskor. Förbehandling med rengöring kan vara nödvändigt.

Förpackningsmaterial

Förpackning	Flaska - HDPE
Förslutning 1L, 1L membran	Kapsyl - PP
Etikett	Etikett - PE
Transportförpackning	Kartong - Wellpapp











Hantering

Förvaras i rumstemperatur i försluten originalförpackning och oåtkomligt för barn. 3 års hållbarhet i oöppnad förpackning, 12 månader efter öppnande.

Produkten innehåller brandfarliga ämnen. Förvara och använd produkten långt ifrån värmekällor, gnistor, öppen eld eller heta ytor. Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	N/A
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.