



Liv Des +45

Produktinformation

Flytande desinfektionsmedel med rengörande verkan (tensid). Har en högre vattenhalt och är därför mer skonsam mot känsliga material och är bättre på att lösa upp blod och fläckar. Avsedd att användas för desinfektion av släta ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter. Produkten kan även användas på allmänna släta ytor som tål alkohol.

Endast för professionell användning, av hälsovårdspersonal (medicinskt ändamål) och professionella lokalvårdare (icke-medicinskt ändamål).

Aktiv substans: isopropanol 376 g/kg.

Innehåller ca 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid.

Bruksanvisning

För icke-invasiva medicintekniska produkter, följ alltid tillverkarens bruksanvisning.

Applicera rikligt med desinfektionsmedel direkt på ytan. Bearbeta ytan med ren torkduk/luddfritt papper. Låt ytan vara fuktig hela verkningstiden, därefter lufttorka. Vid större mängd föroreningar av blod eller andra kroppsvätskor torkas dessa först upp med absorberande material och ytan rengöres innan desinfektion. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Produktdata

Artikelnummer	Benämning	Antal/kartong	EAN
17349300	Liv Des +45 300 ml	24 * 300ml	7391443173400
17340001	Liv Des +45 1 L	12 * 1L	7391443173431
1734M001	Liv Des +45 1 L membrankapsyl	12 * 1L	7391443173486
17340005	Liv Des +45 5 L	2 * 5L	7391443173455

UNSPSC: 42281604





CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa, NB 3033.

Mikrobiologisk effekt:

Verkningstid:

Bactericidal EN13727:	1min
Bactericidal EN13697:	1min
Bactericidal EN16615:	5min
Yeasticidal EN13624:	1min
Yeasticida EN16615:	5min
Mycobactericidal EN14348:	5min
Virucidal EN14476:	
Höljeförsedda virus:	30sek

Användarsäkerhet

Använd Liv Des +45 på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

För ytterligare teknisk specifikation, se säkerhetsdatablad.

- Allvarliga incidenter med Liv Des +45 ska anmälas till info@clemondo.se samt till Läkemiddelsverket.
- Produkten ska inte användas på ytor eller utrustning som är känsliga för produkten, t.ex. material som kan korroderas eller skadas av alkohol.
- Personer med allergier eller känslighet mot vissa kemikalier i desinfektionsmedel kan få hudutslag, andningsproblem eller andra allergiska reaktioner. Använd skyddsutrustning vid behov.
- Kan vara mindre effektiv i närvaro av organiskt material som smuts och kroppsvätskor. Förbehandling med rengöring kan vara nödvändigt.

Förpackningsmaterial

Förpackning 300ml, 1L, 5L	Flaska/Dunk - HDPE
Förslutning 300ml, 1L, 1L membran	Kapsyl - PP
Förslutning 5L	Kapsyl - PP, PE
Etikett	Etikett - PE
Transportförpackning	Kartong - Wellpapp

Hantering











Förvaras i rumstemperatur i försluten originalförpackning och oåtkomligt för barn. 3 års hållbarhet i oöppnad förpackning, 12 månader efter öppnande.

Produkten innehåller brandfarliga ämnen. Förvara och använd produkten långt ifrån värmekällor, gnistor, öppen eld eller heta ytor.

Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast". Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall".





Information/Symbol Description (to be included in IFU)	Symbol	Guidance for use (additional text required/explanations)
Manufacturer (Legal Manufacturer) <i>Shall include physical address</i>		Clemondo AB Makadamgatan 16 254 64 Helsingborg Tel: 042-25 67 00 www.clemondo.se info@clemondo.se
CE mark in accordance with 2017/745 Medical Device Regulations		Yes, no NB number
Medical device		N/A
Catalogue number (=Product/Model number used to identify product to purchasers)		N/A
Product name	N/A	N/A
Intended purpose	N/A	
LOT		N/A
Unique Device Identifier		N/A
Consult instructions for use		N/A
Expiry date		N/A
Warnings/precautions		
	 Fara	Mycket brandfarlig vätska och ånga
	 Fara	Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning. Håll utom räckhåll för barn.