



Artikelnummer 1999911935

ABENA®

Fixeringsbyxor, ABENA Fix Net, M, vit, blå färgkod

- ✓ Fixeringsbyxor i tunna mesh
- ✓ Brett sortiment (S-XXL)
- ✓ Horisontella stabiliserande zoner säkerställer optimal fixering
- ✓ Färgkod midjeband för enkel produktidentifiering
- ✓ Flergångsbruk: kan tvättas 25 gånger



Produktbeskrivning

ABENA Fix Net är en unisexfixeringsbyxa med mindre maskor för flergångsbruk. Nätsticktekniken som används bygger på varpstickning, en metod där garnet stickas i sicksack längs med hela tygets längdriktning. ABENA Fix Net har horisontella stabiliserande zoner, som är idealiska för att hålla större skydd på plats. Trots den lätta konstruktionen är nätprodukterna hållbara. ABENA Fix Net har enkel produktigenkänning tack vare färgkoden på förpackningen och på insidan av linningen. Och i förpackningen finns det också information om produktnamn, storlek, tvättråd och materialsammansättning. Tillverkad i 87 % polyester och 13 % elastan.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Fixeringsbyxor
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Fix Net
Storlek	M
Färg	Vit
Funktioner	Blå färgkod
Ingredienser/sammansättning	87 % polyester, 13 % elastan
Midjemått	70-100 cm
Låromkrets	45-60 cm
Höftmått	80-130 cm
Vikt, netto	14 g
Kön	Unisex
Märkningar	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Hållbarhetstid	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus.
Tvättråd	Tvätta i 60 °C. Torktumla med skonsamt program. Kan tvättas ca 25 gånger. Tvättas med fördel i tvättpåse för att ytterligare förlänga hållbarheten. Användning av blekmedel kan påverka produktens hållbarhet.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Bruksanvisning

ABENA Fix Net är en del av den tvådelade inkontinenslösningen, för fixering av ett inkontinensskydd. Fixeringsbyxor är bredare i grenen och mer elastiska än vanliga underkläder. Tack vare hög komfort och säkerhet underlättar de i vardagen.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	100 st	42 cm	30.5 cm	20.6 cm	5703538475320
fp	50 st	27.5 cm	20 cm	16 cm	5703538475313
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



UKCA-märkningen garanterar att en produkt är säker att använda samt att den efterlever alla säkerhetsåtgärder i linje med produktstandarder och lagstiftning i Storbritannien.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Tål ej blekning.



Tål torktumling på låg värme.



Tål ej strykning.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 25 gånger.



Meshstickningstekniken bygger på varpstickning, en metod där garnet bildar sicksackstygn längs tygets längd, i motsats till sömlös/ inslagsstickning.



Designad för att följa kroppens konturer och säkerställa en säker, bekväm passform som håller sig på plats.

